



NOUVEAUTE ALTEOR,

ATTELLES D'IMMOBILISATION / COMPRESSION ET DE CRYOTHERAPIE

Attelle de cheville

Taille	Code ACL	Coloris
Unique	3401 02941126 1	Noir
		

Attelle de genou

Taille	Prise de mesure	Code ACL	Coloris	
S	Cuisse : 40-55 cm Mollet : 30-45 cm	3401 02941161 2	Noir	
L	Cuisse : 55-70 cm Mollet : 45-60 cm	3401 02941155 1		

Indications médicales :

Traitement des lésions ligamentaires
 Post-traumatique et post opératoire

Indications médicales :

Traitement des lésions ligamentaires
 Post-traumatique et post opératoire

A prescrire : Attelle de cheville gonflable
 STABI-FROID / ALTEOR

A prescrire : Attelle de genou gonflable
 STABI-FROID / ALTEOR

CARACTERISTIQUES

LES + PRODUITS

Nouveauté : Alliance des bénéfices de compression et de contention d'une attelle classique à la thérapie par le froid	Froid : effet antalgique et vasoconstricteur réduisant l'inflammation, l'hématome et/ou l'œdème
Attelle compressive gonflable	Pompe à air : grâce à une action de compression, le gel est mieux réparti sur la peau pour une meilleure diffusion du froid.
Fixation par auto-agrippants	Mise en place facile : 3 sangles pour l'attelle de genou (2 pour la cheville) pour un ajustement idéal.
Poches de gel	2 poches de gel : poursuite du traitement sans interruption Quantité de gel adaptée : assure une température cutanée de 15°C pendant 20 min.
Sachet de protection pour poches de gel	Sachet de protection pour refroidissement Personnalisable avec le nom du patient / numéro de chambre
Filet d'entretien	Pour transporter, laver et ranger facilement votre attelle

MISE EN PLACE ATELLES STABI-FROID

1

2

3

4

5

6

7

EN 7 ETAPES

Placer au congélateur les deux poches de glace préalablement disposées dans les sacs hermétiques pendant 1h30.

Protéger la partie lésée à l'aide du tissu de protection fourni.

Fixer l'une des poches sur l'attelle et appliquer le dispositif sur la partie lésée. Serrer à l'aide des bandes auto-agrippantes.

Tourner la valve sur « on » et gonfler l'attelle jusqu'à l'obtention de l'immobilisation et de la compression souhaitées. Tourner la valve sur « off ». (Pour plus de confort, vous pouvez dévisser le système de gonflage)

Conserver l'attelle entre 20 et 30 minutes.

Pour enlever l'attelle, placer la valve sur « on » et appuyer sur le bouton à la base de la pompe pour la dégonfler.

Renouveler l'opération si nécessaire avec la seconde poche. Remettre la première poche au congélateur.



CREATEUR DE SOLUTIONS ORTHOPEDIQUES

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Sur prescription médicale, spécifiant la durée du traitement
- La première mise en place doit être effectuée par un professionnel de santé apte à appliquer le dispositif
- Ne pas appliquer en cas d'hypersensibilité au froid
- Le patient devra être suivi régulièrement jusqu'à consolidation de ses lésions
- Ne pas mettre ce dispositif en contact direct avec une plaie
- En cas de douleur ou de sensation d'inconfort, consulter un médecin

ALTEOR 

ARCHITECTE DU MOUVEMENT